

Surgistain

Surgistain er et rensmiddel som regngjør/rener missfargede og matte instrumenter.

Ved bruk av Surgistain renses porene i stålet noe som resulterer i at instrumentet blir blankt, men også tørt og fort missfarget igjen om det ikke etterbehandles med Premixslip.

For å skåne deg selv anbefales bruk av hansker, maske og briller ettersom kontakt med slimhinner kan føre til ubehag.

NB! *Surgistain skal ikke brukes på krom eller sølv og gull belagte instrumenter. Det kan heller ikke brukes på trachial tuber, Scope og dilatorer.*

Bruk

Surgistain blandes i forholdet 1/7 med varmt vann.

Ideal temperatur er mellom 60-80 grader, så har dere et tilgjengelig ultralydbad med temperaturregulator er dette det aller beste.

(kun temperaturen som skal brukes, ikke ultralyd funksjonen)

Har dere ikke dette anbefales en balje med varmt vann.

La instrumentene ligge i ca 30 min, tørk/vask deretter av instrumentene med en klut, børste etc.



Art. nr. 8050021022 Surgistain 4 L
Art.nr. 8050021012 Surgistain 500 ml

Etter endt tørking/vasking vaskes instrumentene i vaskemaskinen før de sprayes med Premixslip. De kan legges fuktige/våte rett i pose for sterilisering, Premixslip er klinisk godkjent for dette bruk.