



## Liv Des+72

### Overflatedesinfeksjon

Flytende etanolbasert overflatedesinfeksjon med tensid, med et alkoholinnhold på 75 %. Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre spredning av mikrobiologiske infeksjoner (bakterier, sopp, virus) via overflater. Tilsetning av overflateaktivt middel øker alkoholens kontakt med overflaten. Produktet er godt egnet for overflater forurenset med kroppsvæsker, blod etc. dvs. lett skitne overflater.

#### Bruksanvisning

Spray en rikelig mengde desinfeksjon på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren tørkeklut eller lofritt papir. Det er viktig at overflaten er fuktig under rengjøringen. Bruk hansker for å unngå uttørring av huden.

#### Produktet oppfyller den europeiske standarden for desinfeksjonsmidler.

|                    |                   |       |
|--------------------|-------------------|-------|
| • Bakteriedrepende | EN 13727          | 5 min |
| • Bakteriedrepende | EN 13697          | 2 min |
| • Bakteriedrepende | EN 16615          | 5 min |
| • Gjærdrepende     | EN 13624          | 5 min |
| • Gjærdrepende     | EN 13697          | 2 min |
| • Gjærdrepende     | EN 16615          | 5 min |
| • Soppdrepende     | EN13624           | 5 min |
| • Virusdrepende    | EN 14476          | 5 min |
|                    | Innkapslede virus | 1 min |
|                    | Murint Norovirus  | 5 min |

*Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.*

| Navn        | Mengde | Antall i eske | Art. Nr. |
|-------------|--------|---------------|----------|
| Plastflaske | 1 L    | 12 stk/krt    | 17230001 |



#### Produktegenskaper

- pH-verdi: 7
- Etanolbasert
- Med tensid
- Motvirker bakterier, sopp og virus

**Produksjonsland:** Sverige