



Turnstr.31 75228Ispringen Germany Tel.+497231/803-0

www.dentaaurum.com
info@dentaaurum.com

BRUKSANVISNING

Kjære kunde,

Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Dentaaurum. Vennligst les denne bruksanvisningen for å sikre at du bruker produktet på en trygg og enkel måte, og at både du og pasientene får full nytte av det. Ved spørsmål eller innspill, vennligst kontakt din lokale representant.

Siden våre produkter regelmessig oppgraderes, anbefaler vi at du alltid nøye leser den nyeste bruksanvisningen som følger med produktet, og som også er tilgjengelig på internett på www.dentaaurum.com, selv om du ofte bruker det samme produktet.

1. Produsent

Dentaaurum GmbH & Co KG · Turnstr. 31 · 75228 Ispringen · Tyskland

2. Produktbeskrivelse

Ansiktsbuen består av en innerbue som plasseres intraoralt, og en ytterbue som plasseres ekstraoralt. Begge buene er laser-sveiset sammen i midten.

3. Tiltent bruk

Som en del av hodeutstyr fungerer ansiktsbuen som ekstraoral forankring og/eller til dental eller skjelettkorreksjon av vertikale og sagittale avvik.

4. Tiltente brukere

Alle produkter er kun beregnet for tannhelsepersonell.

5. Indikasjoner

Som en del av hodeutstyr kan ansiktsbuen bistå med distalisering i den øvre bakre regionen, sikre forankring og støtte skjeletthinhibisjon i maxilla.

6. Kontraindikasjoner

Standard ansiktsbue kan ikke brukes på pasienter med nikkelallergi. Nikkelfri Noninium Facebow medium er et mulig alternativ. Advarsler finnes på de respektive produktetikettene. Se også punkt 10, Sammensetning.

7. Pasientmålgruppe

Alle pasienter der fast apparatur kan brukes som en del av ortodontisk behandling.

8. Bruksområde

Ansiktsbuen fungerer som ekstraoral forankring og/eller dental eller skjelettkorreksjon av vertikale og sagittale avvik.

9. Sikkerhetsinformasjon for ortodontisten

Du har foreskrevet ansiktsbuen og hodeutstyret til pasienten for ortodontisk behandling. Det kan kun brukes av pasienten etter instruksjon fra deg.

Dersom det brukes feil eller fjernes uforsiktig uten å løsne de fleksible båndene i hodeutstyret, kan ansiktsbuen plutselig slå tilbake og forårsake alvorlig skade.

Av sikkerhetsgrunner og for pasientenes sikkerhet, må kun hodeutstyr med sikkerhetsmoduler brukes!

Hodeutstyret og ansiktsbuen må kun tilpasses og overleveres av ortodontisten eller tannlegen.

10. Sammensetning

Sammensetningen er inkludert i materiallisten; se katalogen eller www.dentaurum.com.

11. Sikkerhetsinformasjon

Produktet skal ikke brukes hvis det er kjent allergisk reaksjon mot en eller flere av materialkomponentene.

12. Informasjon om engangsprodukter

Produktet er kun beregnet for engangsbruk. Gjenvinning av et produkt som allerede er brukt (resirkulering) og gjenbruk på en pasient er ikke tillatt.

13. Informasjon om desinfeksjon

Desinfisering før første gangs bruk er ikke nødvendig.

14. Merknader om avhending

Ved avhending av produktet, vennligst følg nasjonale forskrifter som gjelder for din region, samt - hvis tilgjengelig - detaljer oppgitt i sikkerhetsdatabladene.

15. Produktutvalg

Ansiktsbuer er tilgjengelige i størrelsene mini, medium og maxi. Se vår ortodontikatalog for flere detaljer.

16. Ytterligere informasjon

Dersom tannhelsepersonell og/eller pasienten oppdager alvorlige problemer som oppstår ved bruk av produktet, er det viktig å informere produsenten og den kompetente myndigheten i landet der tannhelsepersonellet og/eller pasienten er bosatt.

17. Kvalitetsinformasjon

Dentaurum sikrer feilfri kvalitet på sine produkter. Innholdet i denne bruksanvisningen er basert på våre egne erfaringer. Tannhelsepersonell er alene ansvarlig for bearbeidingen av produktene. Ansvar for feil kan ikke tas, da Dentaurum ikke har innflytelse på bearbeidingen på stedet.

8. Forklaring av symboler brukt på etiketten



Vennligst referer til etiketten. Ytterligere informasjon finnes på www.dentaurum.com
(Forklaring av symboler REF989-313-00).